


Kako primeniti ESTROTECT™ toplotne detektore

1

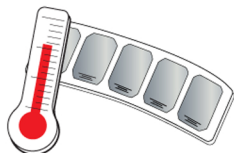

DRŽATI DETEKTORE ESTRUSA NA TOPLOM.

ESTROTECT™ toplotne detektore treba zagrejati do 38°C neposredno pre primene, da aktiviraju lepak.

2



IZABERITE MESTO ZA POSTAVLJANJE.

Idealno mesto za postavljanje je koren repa.

3



OČETKAJTE DLAKU TEMELJNO.

Očerkajte dlaku da biste uklonili prljavštinu i prašinu.

4



OČISTITE DLAKU.

Očistite površinu dlake pomoću ESTROTECT™ maramice.

5



NALEPITE DETEKTOR.

Čvrsto pritisnite i trljajte prstima. Ne primenjujte u kišnim vremenskim uslovima.

6

PROVERITE REZULTATE.

Ako se sa detektora skine više od 50% srebrnog sloja, krava je u estrusu.



U ESTRUSU



VAN ESTRUSA